



Die Rolle Maxi 120 mit der Länge von 120 cm (früher 100 cm) und einem Durchmesser von 20 cm ist mit lockerem, elastischem aber druckstabilem Material gefüllt (zwei Komponenten), welches wir dahin streichen können, wo wir es brauchen. Sie eignet sich sowohl zur Weich- als auch zur Stabil-Unterstützung. Die Mischung der Füllung aus Schaumstoffstäbchen und EPP-Polsterperlen ist leicht form- und anschmiegar, unter Druck wird sie dagegen formstabil. Die Rollen wurden in Zusammenarbeit mit Praxisanleiterinnen der Basalen Stimulation® entwickelt.

Anwendungsbeispiele mit der Rolle Maxi 120

Positionsunterstützung der Beine

Zentrales Bedürfnis in der Rückenlage: Die Wade muss freiliegen oder auf weiches Material gebettet werden, damit der venöse Rückfluss gewährleistet ist. Ausserdem sollten die Fersen freigelagert und die Knie in leichter Beugung weich und breit unterlegt sein, z.B. mit der Rolle Maxi 120.

Eine Rolle Maxi 120 wird glatt gestrichen und das leicht angewinkelte Bein darauf gelegt. Ober- und Unterschenkel werden flächig unterstützt, die Kniekehle soll dabei frei liegen, der Knöchel erhält eine Mulde zur Druckentlastung.

Dem Fuss geben wir einen Halt, damit er dagegen drücken kann; so kann sich die Patientin selber ein wenig in Bewegung bringen.

Unterstützung nach Schulteroperation

In der Orthopädie dient die Rolle Maxi 120 als eine Alternative zum Ortho-Gilet nach einer Schulteroperation. Die operierte Schulter soll auf der Matratze aufliegen. Mit der Rolle Maxi 120 wird der Ellbogen, Unterarm und die Hand unterstützt. Die mit der Rolle gebildete Rampe erleichtert den Blut- und Lymphabfluss.



Die Bilder zeigen zwei von vielen Anwendungsmöglichkeiten mit der Rolle Maxi 120.

Bezüge

Doppel-Jersey



Diese Bezüge sind aus 100% langstapiger Baumwolle (205 gr/m²) und sind Koch- und Chlorecht. Die Standardfarbe ist Königsblau. Weitere Farben auf Anfrage.

Inkontinenz



Der Inkontinenz-Bezug mit Reissverschluss an beiden Enden besteht aus einem PU-beschichteten Gewebe und ist MRSA-dicht.

Pflegehinweis

Rollen und Kissen



Doppel-Jersey-Bezüge



Inkontinenz-Bezüge



Abwischbar mit üblichen Desinfizienzien

Ausführliche Hinweise zur Pflege und allgemeiner Handhabung finden Sie unter:

www.bewegtes-lagern.com/uebersicht