



Die Rolle Maxi 220 und 160 mit den Längen von 220 cm und 160 cm haben einen Durchmesser von 20 cm. Sie sind mit lockerem, elastischem aber druckstabilem Material gefüllt (zwei Komponenten), welches wir dahin streichen können, wo wir es brauchen. Sie eignen sich sowohl zur Weich- als auch zur Stabil-Unterstützung. Die Mischung der Füllung aus Schaumstoffstäbchen und EPP-Polsterperlen ist leicht form- und anschmiegar, unter Druck wird sie dagegen formstabil. Die Rollen wurden in Zusammenarbeit mit Praxisanleiterinnen der Basalen Stimulation® entwickelt.

Beide Rollen sind in ähnlichen Situationen anwendbar. Die kürzere 160 cm Rolle eignet sich vor allem für die Anwendung bei kleingewachsenen Patienten und für den Gebrauch zu Hause. Ist eine Unterstützung über die ganze Körperlänge angebracht, dann kommt die 220 cm Rolle zur Anwendung.

## Anwendungsbeispiele mit der Rolle Maxi 220 bzw. 160

### Halbe Bauchlage

Das Bild zeigt die Unterstützung in der halben Bauchlage. Die Länge der Rolle und ihre Anpassungsfähigkeit ermöglichen eine weiche und breitflächige Unterstützung des Körpers auf der sensiblen Brust- und Bauchseite, über die ganze Länge, bis zu den Füßen. Diese Positionsunterstützung vermittelt Halt und Geborgenheit.

### Halbe Rückenlage

Auf der robusteren Rückseite lässt sich durch sattes anstreichen der Rolle ein bündiger und sicherer Rückhalt geben. Die harten Stellen Knie und Knöchel des unten liegenden Beines werden zusätzlich mit je einem Multifunktions-Kissen Mini freipositioniert. Das Bild rechts zeigt die stufenweise Positionsveränderung in der halben Rückenlage. So ist auch nachts eine Gewichtsverlagerung möglich, ohne den Schlaf zu stören.



Die Bilder zeigen zwei von vielen Anwendungsmöglichkeiten mit der Rolle Maxi 220 und 160.

## Bezüge

### Doppel-Jersey



Diese Bezüge sind aus 100% langstapiger Baumwolle (205 gr/m<sup>2</sup>) und sind Koch- und Chlorecht. Die Standardfarbe ist Königsblau. Weitere Farben auf Anfrage.

### Inkontinenz



Der Inkontinenz-Bezug mit Reißverschluss an beiden Enden besteht aus einem PU-beschichteten Gewebe und ist MRSA-dicht.

## Pflegehinweis

### Rollen und Kissen



### Doppel-Jersey-Bezüge



### Inkontinenz-Bezüge



Abwischbar mit üblichen Desinfizienzien

Ausführliche Hinweise zur Pflege und allgemeiner Handhabung finden Sie unter:

[www.bewegtes-lagern.com/uebersicht](http://www.bewegtes-lagern.com/uebersicht)