



Die Rolle Midi 200 mit den Längen von 200 cm hat einen Durchmesser von 16 cm. Sie ist mit lockerem, elastischem aber druckstabilem Material gefüllt (zwei Komponenten), welches wir dahin streichen können, wo wir es brauchen. Sie eignet sich sowohl zur Weich- als auch zur Stabil-Unterstützung. Die Mischung der Füllung aus Schaumstoffstäbchen und EPP-Polsterperlen ist leicht form- und anschmiegar, unter Druck wird sie dagegen formstabil. Die Rollen wurden in Zusammenarbeit mit Praxisanleiterinnen der Basalen Stimulation® entwickelt.

Diese Rolle eignet sich für den Einsatz bei Kindern und zierlich gebauten erwachsenen Personen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind ähnlich wie bei der Rolle Maxi 220.

Anwendungsbeispiele mit der Rolle Midi 200



Die Bilder zeigen einige von vielen Anwendungsmöglichkeiten der Rolle Midi 200.

Diese Rolle ist angedacht für Kinder, die viel Zeit im Bett verbringen müssen. Auch Kinder sind bei schweren Erkrankungen Dekubitus gefährdet und brauchen Anregung ihre Positionen immer wieder zu verändern. Die Rolle entlastet Körperteile eines Kindes nach Bedarf dort, wo es diese benötigt. Zum Kuschneln und Spielen ist sie ebenfalls ein guter Begleiter.

Auch zierliche Erwachsene profitieren von dieser Rolle, denn sie gibt immer noch viel Halt und ist vielseitig anwendbar um die Position mit wenig Kraft zu verändern.

Bezüge

Doppel-Jersey



Diese Bezüge sind aus 100% langstapiger Baumwolle (205 gr/m²) und sind Koch- und Chlorecht. Die Standardfarbe ist Königsblau. Weitere Farben auf Anfrage.

Inkontinenz



Der Inkontinenz-Bezug mit Reißverschluss an beiden Enden besteht aus einem PU-beschichteten Gewebe und ist MRSA-dicht.

Pflegehinweis

Rollen und Kissen



Doppel-Jersey-Bezüge



Inkontinenz-Bezüge



Abwischbar mit üblichen Desinfizienzien

Ausführliche Hinweise zur Pflege und allgemeiner Handhabung finden Sie unter:

www.bewegtes-lagern.com/uebersicht